

PALOVAMMAGEELI

(fi) **SUOMI Käyttötarkoitus:** Vesipohjainen geeli pienten palovammojen, auringonpolttamien ja UV-säteilyn aiheuttamien ihovaurioiden ensihoitoon. **Kohderyhmä:** Voidaan käyttää kaiken ikäisille. Laitte on tarkoitettu käytettäväksi itsehoidossa (maallikot), laitoksissa ja työpaikoilla. Voidaan käyttää ilman teknistä kokemusta tai koulutusta. **Ohjeet:** Levitä geeliä runsaasti palovammaan välittömästi. Lisää geeliä tarvittaessa noin 15 minuutin kuluttua. Geeli on helppo pestä tai pyyhkiä pois, kun palovamma tuntuu paremmalta tai 30–60 minuutin kuluttua.

Koostumus: Puhdistettu vesi, karbomeeri, säilöntäaineet, aloe vera, natriumhydroksidi.

Säilytys: Säilytä huoneenlämmössä 15–30 °C. **Säilyvyysaika:** 3 vuotta.

Varastointi-/kuljetuslämpötila: –20–30 °C.

Varotoimenpiteet: Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tilasi jatkuu tai pahenee tai jos palovammasi ei vaalene paineen vaikutuksesta. Jos tuotteeseen liittyy vakava vaaratilanne, ilmoita asiasta paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja valmistajalle.

Vasta-aiheet: Ei saa käyttää pinnallisia palovammoja syvempiin palovammoihin, eikä esimerkiksi kemiallisiin palovammoihin, fototoksiin reaktioihin, lääkkeiden aiheuttamiin ihoreaktioihin tai sähköiskun aiheuttamiin ihovaurioihin.

Varoitus: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille. Suojaa auringonvalolta. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Hävittäminen: Noudata paikallisia ohjeita paineistettujen säiliöiden turvallisesta hävittämisestä.

BRÄNNSKADEGEL

(sv) **SVENSKA Avsedd användning:** Vattenbaserad gel vid behandling av mindre brännskador, skällningar, solbränna och hud skadad av UV-strålning. **Målgrupp:** Kan användas för alla åldrar. Produkten ska användas i egenvård (lekmän), på institutioner och arbetsplatser. Kan användas utan teknisk erfarenhet eller utbildning. **Instruktioner:** Applicera omedelbart riklig mängd gel på brännskadan, vid behov applicera mer efter cirka 15 minuter. Gelen kan lätt tvättas eller torkas av när brännskadan känns bättre eller efter 30–60 minuter.

Sammansättning: Renat vatten, karbomer, konserveringsmedel, aloe vera, natriumhydroxid.

Förvaring: Förvaras i rumstemperatur: 15–30 °C. **Hållbarhet:** 3 år.

Förvarings-/transporttemperatur: –20–30 °C.

Försiktighetsåtgärder: Sök läkarvård om ditt tillstånd kvarstår eller förvärras eller om din brännskada inte bleknar av tryck. Om någon allvarlig händelse inträffar i samband med produkten, rapportera till den lokala behöriga myndigheten och tillverkaren.

Kontraindikationer: Använd inte på djupare än ytliga brännskador, dvs. använd inte om inte huden bleknar vid lättare tryck eller på andra typer av brännskador som kemiska brännskador, fototoxiska reaktioner, medicinska biverkningar eller skador orsakade av elektricitet.

Varning: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra

antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Skyddas från solljus. Förvaras oåtkomligt för barn.

Avfallshantering: Följ lokala föreskrifter för säker kassering av trycksatt behållare.

3 **REF** 2004-1

MD **175**



Dermoshop Ltd
66200 Korsnäs, Finland
+358 20 7466 400, dermosil.com

(01) 07332343300343

LOT (10) V1. 2024-03-12AP



(17) Katso pohja
Se botten av flaskan.



Aurena Laboratories AB
Fjärrviksvägen 22
SE-653 50 Karlstad

